





Автоматизированная функция приготовления мазка.
Позволяет готовить мазок для окраски по Граму, включая высушивание и маркировку стекла.

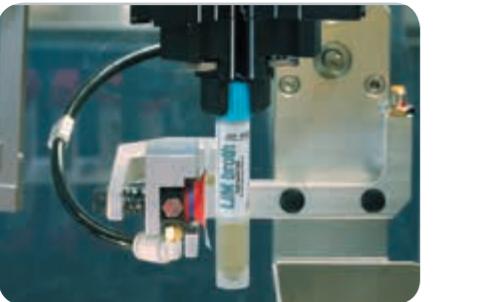

Инокуляция в жидкую среду накопления (бульон).
Позволяет готовить мазок для окраски по Граму, включая высушивание и маркировку стекла.



Диск-диспенсер для нанесения дисков с антибиотиками.
Полностью автоматизированный процесс пересева в бульон, включая автоматизированную маркировку пробирки.

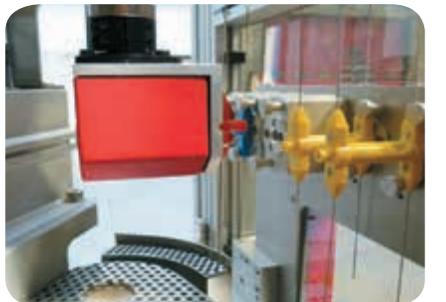

Автоматизированная замена петель.
Позволяет полностью исключить вмешательство оператора в технологический процесс.



Боковая маркировка чашек со средой.
Не мешает просматривать чашки с посевами и не создает помех при выявлении таких признаков, как гемолиз или изменение цвета среды.



Универсальные варианты протокола.
Формируются с учетом качества культуральной среды, чувствительности теста и экономической эффективности при классическом посеве, посеве нескольких образцов на одну чашку, выборе различных типов петель.



WASPLab™

WASPLab® производства компании COPAN - полностью автоматизированное и интегрированное решение, которое усиливает возможности WASP на всех этапах автоматизации микробиологического исследования, начиная от посева и заканчивая инкубацией и чтением результатов.

WASPLab также позволяет автоматизировать стандартные этапы подготовки культуры для идентификации, включая нанесение культуры на мишень MALDI-TOF.

Работа WASPLab координируется установкой WASPLab Central, которая является управляющим центром для всех модулей WASPLab® и обеспечивает их бесперебойное и слаженное взаимодействие.



DANIES

Официальный дистрибутор компании COPAN в России

Тел.: (495) 737-48-30
Факс: (495) 737-48-31
www.danies.ru



Будущее микробиологии: автоматизированная система посева клинических образцов, полная роботизация микробиологических исследований



WASP® предлагает готовые решения для преаналитического этапа микробиологической диагностики.

WASP® - это роботизированная система, объединившая в себе автоматизированный процесс микробиологического посева, приготовление мазка и пересев в бульон.

В то время, как имеющиеся на рынке конкурирующие системы решают задачи только микробиологического посева, Соран продолжает добиваться инновационных успехов в развитии автоматизации микробиологической диагностики.

Поскольку процесс микробиологического посева – это лишь часть диагностического исследования, инженеры и разработчики прибора спроектировали WASP как открытую модульную платформу.

Благодаря этому прибор может дополняться новыми функциями и возможностями.



Модульная структура инструмента увеличивает инвестиционную долговечность



Контейнеры различных размеров с исследуемым образцом автоматически раскручиваются и закручиваются



Непрерывная подача образцов увеличивает производительность прибора



Высокая производительность обработки и посева образца



Технология интеллектуального сканирования штрих-кода позволяет осуществлять считывание информации с этикетки, независимо от ее положения



Аналитическая система контроля изображения: контролирует точность и правильность взятия исследуемого материала петлей



Карусель с 9 колонками для 378 чашек Петри любого производителя



Наличие HEPA фильтра, а также изолированность от внешней среды и последовательная индивидуальная работа с каждым образцом, гарантируют чистоту работы и безопасность взятия исследуемого материала петлей



Для предотвращения осаждения материала на дне пробирки предусмотрен процесс встряхивания образца



Многовариантность опций LIS, устанавливаемых на WASP, позволяет прибору подключаться к глобальной системе LIS целого учреждения, используя стандартные одно- или двунаправленные коммуникации



Многоразовые металлические петли, используемые для инокуляции и посева, стерилизуются после каждого использования. Такой подход значительно снижает стоимость затрат на расходные материалы и позволяет в целом снизить стоимость одного теста



Никакого аутсорсинга: все программное обеспечение интегрировано в оборудование, собранное в соответствие с передовыми технологиями. Это позволяет настраивать прибор исключительно под потребности каждого клиента

